

عملکرد فوری در هنگام بروز آلام های خاص دستگاه های دیالیز فرزنیوس توسط پرستار

ردیف	آلام دستگاه	اقدام مورد نیاز توسط پرستار
۱	F07 Conductivity	چک اورینگ های کاور بی بگ و در صورت نیاز تعویض اورینگ مربوطه
۲	F02 neg. pressure	چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به مدت ۵ دقیقه در آب جوش
۳	F16 pos. Pressure	چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به مدت ۵ دقیقه در آب جوش
۴	F20 pos. Pressure	چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به ۵ دقیقه در آب جوش و کلمپ مسیر ضد عفونی از پشت دستگاه
۵	F26 pos. Pressure	خاموش و روشن کردن دستگاه با کلید مشکی پشت دستگاه

شرکت تجزیه و تحلیل پزشکی  
(سای خاص)